

ACCESO ARTERIAL  
Catéter arterial



arterial leader**cath**<sup>®</sup>

Seguro, simple y exitoso



Value Life

## La solución: la técnica de Seldinger

El Leadercath arterial se coloca mediante la ya probada técnica de Seldinger. Una vez que se ha confirmado el reflujo de sangre, la guía estabiliza la arteria para permitir la colocación del catéter con éxito, incluso cuando las condiciones de los vasos no son las ideales.


El uso clásico y natural de la aguja ecogénica; una guía de seguridad recta con una punta flexible, y un catéter de polietileno (resistente a la presión) con líneas ORX, reduce el riesgo de colocación incorrecta. La rutina de inserción precisa de la aguja, permite que punción arterial percutánea sea suave y precisa. La punta flexible del la guía, se adapta exactamente a la estructura del vaso y ayuda en forma segura, el avance del catéter en la inserción. Gracias a la transición homogénea de la punta del catéter sobre la guía de seguridad, la colocación del catéter es menos traumática.

La combinación de material, el diámetro y la longitud del catéter, ofrece transmisión de la señal de presión constante, incluso durante tiempos de permanencia prolongados.

Este catéter es adecuado para una variedad de aplicaciones arteriales y venosas en adultos y niños dependiendo de la longitud y el tamaño del catéter.

arterial leadercath es indicado para

- Cateterización arterial
- Cateterización venosa profunda
- Cateterización venosa periférica (midline)

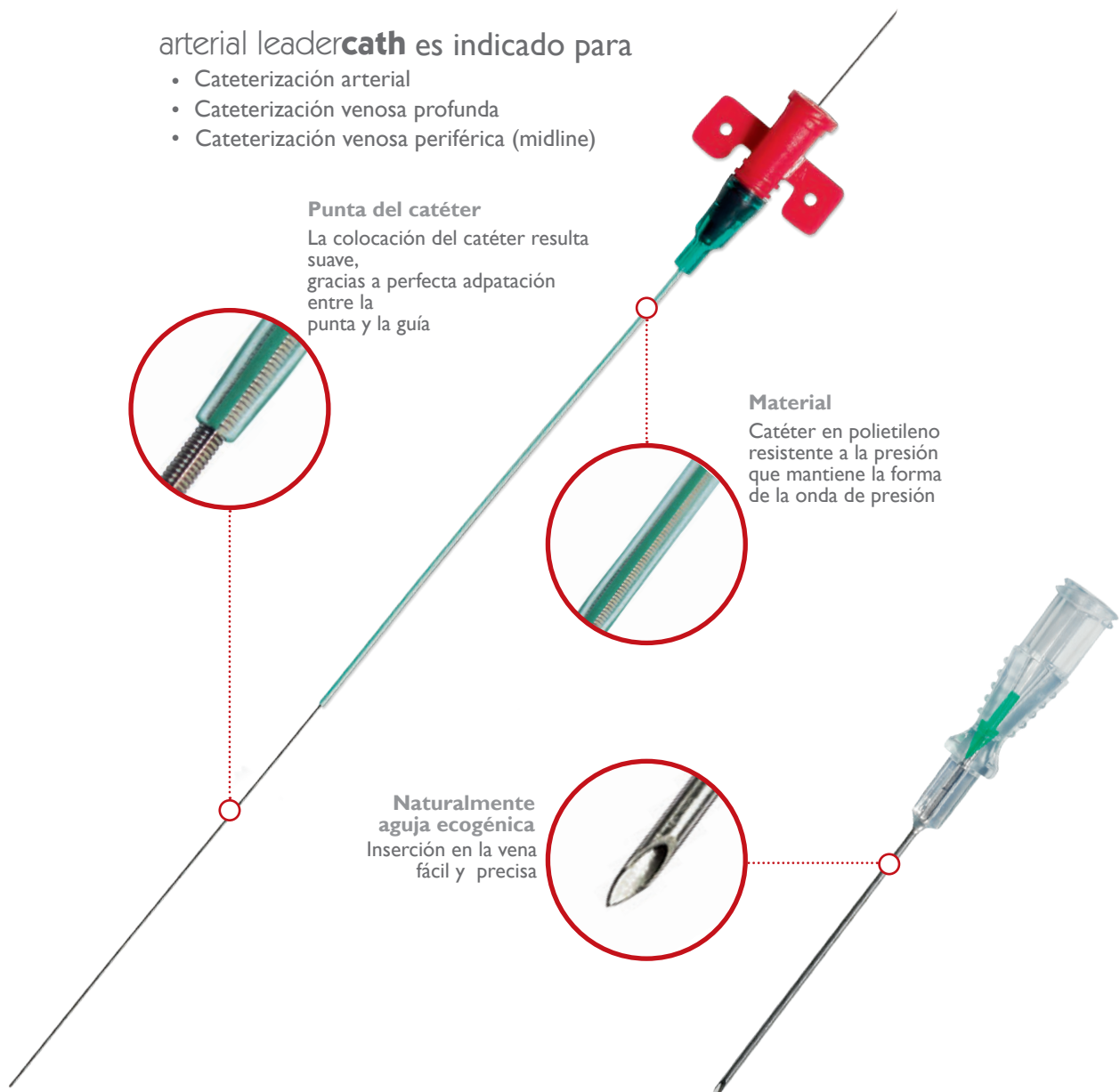

Fijación con cierre de la marca VELCRO®

**Simple**

- ▶ Sistema de fijación de la marca VELCRO®: simple, rápido y seguro

**Seguro**


- ▶ Estéril, libre de latex, diseñado para una correcta fijación.
- ▶ Tanto las aletas y el racor del catéter, se sujetan con seguridad dentro de el vendaje para minimizar el movimiento del catéter en el sitio de inserción.

**Confiable**

- ▶ La fijación del catéter es confiable, adhesiva e hipoalérgica. Nos asegura una alta resistencia minimizando los movimientos y el arrancamiento del catéter una vez colocado.
- ▶ Griplok está diseñado para asegurar el catéter sin suturas.



**Fijación del catéter**

La marca VELCRO® y la combinación de adhesivo proporciona fuerza y estabilidad para minimizar el movimiento del catéter y para evitar una salida accidental del catéter.

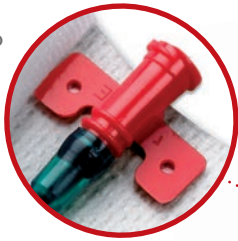


**Material del vendaje**

Material de vendaje flexible se adapta a la piel.

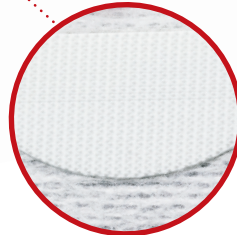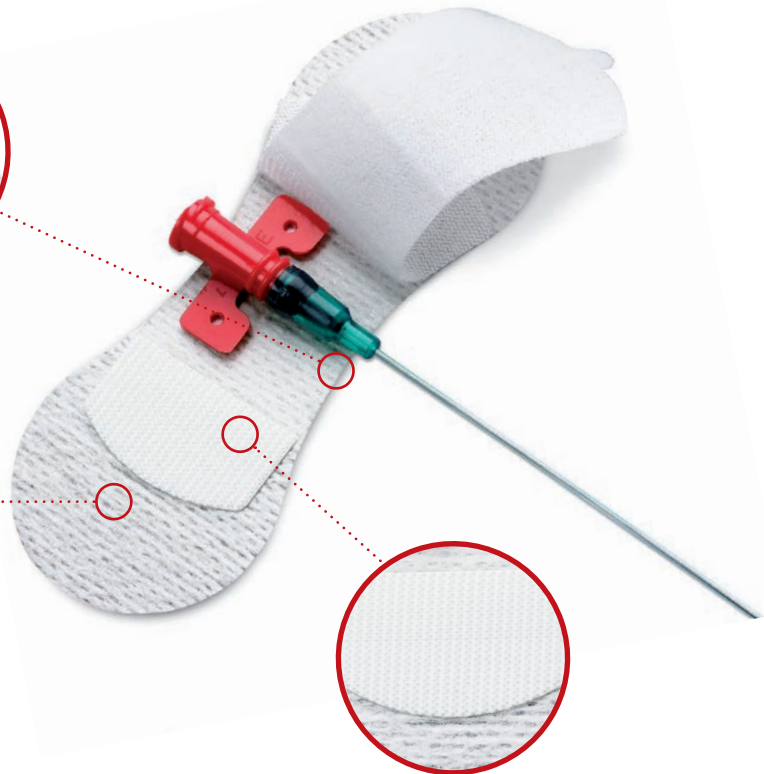

**Sistema de fijación VELCRO®**

Fácil de abrir y cerrar para el cambio de los prolongadores.

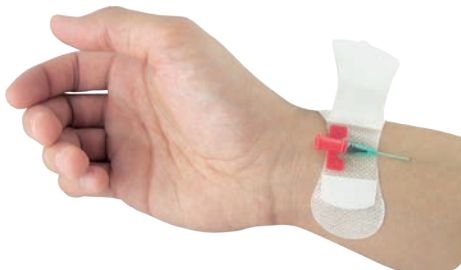

Griplok está disponible como parte de un kit. Por más información, contacte al representante local de Vygon.

VELCRO® es una marca registrada de Velcro Industries B.V.

# Arterial Leadercath

Código de producto	Catéter				Aguja punción		Guía		Unidades por caja
	Ø (Fr)	Largo (cm)	Int. Ø - Ext. Ø (mm)	Flujo (ml/min)	Gauge (G)	Largo (cm)	Ø (mm)	Largo (cm)	
115.090	3	8	0.6 - 0.9	24	20	38	0.53	20	20
115.092	3	2	0.6 - 0.9	33	20	38	0.53	20	20
115.094	3	4	0.6 - 0.9	30	20	38	0.53	20	20
115.096	3	6	0.6 - 0.9	27	20	38	0.53	20	20
115.11	4	10	0.8 - 1.2	24	19	54	0.71	30	20
115.118	4	8	0.8 - 1.2	43	19	54	0.71	30	20
115.12*	4	18	0.8 - 1.2	34	19	68	0.71	46	5
115.15*	4.5	18	1.0 - 1.5	67	17	70	0.9	46	5
115.17*	5	18	1.2 - 1.7	109	16	70	1.1	46	5

#### Presentado en un blister rígido que contiene:

- 1 catéter transparent con líneas ORX (PE)
- 1 aguja introductora
- 1 guía

\* estos códigos también contienen: 1 prolongador de polietileno (30 cm), 1 jeringa de 5 ml y 1 llave de tres vías

Leader Cath Arterial se puede pedir en kits VYSET®  
Para más información contacte a su representante Vygon.

## CUIDADO CRÍTICO

Para más información, contactenos: [abolivar@vygon.com.co](mailto:abolivar@vygon.com.co) / [alvaro2167@hotmail.es](mailto:alvaro2167@hotmail.es)

Las especificaciones enseñadas en este folleto son únicamente informaciones y no son, bajo ningún concepto, de naturaleza contractual.

Vygon España Calle 79 # 74 - 29  
PATERNA (Valencia)  
Tel: 902 876 288 Fax: 902 876 289  
[www.vygon.com](http://www.vygon.com)

46988



[www.vygon.com.co](http://www.vygon.com.co)